

Istruzioni d'uso protesica per impianti Multysystem®



Premessa: Questa linea protesica è progettata per essere utilizzata per la preparazione e protesizzazione di impianti dentali (tipo esagono interno, tipo esagono con cono morse e monofasici) della linea Multysystem

Protesica Classe IIb:

② VITE DI GUARIGIONE (Classe IIb – realizzato in Titanio gr.5)

Rimuovere la vite di chiusura dell'impianto. Pulire con fisiologica la testa dell'impianto assicurandosi che sia perfettamente libera da interferenze di tessuto osseo o gengivale. Rilevare l'altezza dei tessuti molli e scegliere l'altezza della vite di guarigione da utilizzare. Provvedere ad avvitare la vite di guarigione scelta. Tempo di permanenza consigliato 15-20 giorni. Torque di serraggio della vite di bloccaggio: 15 Ncm

② MONCONE IN TITANIO (tipo POSTE PILAR) (Classe IIb – realizzato in Titanio gr.5)

E' dotato di vite di fissaggio con la quale si connette all'impianto. E' indicato per protesi avvitata (ponti e corone singole). Grazie al suo sistema esagonale antirotazione ed alla sua conicità è impiegato per sostenere sia corone singole che ponti. E' possibile accorciarlo e rettificarlo, quindi modellarlo direttamente sull'impianto. Torque di serraggio della vite di bloccaggio: 30 Ncm

② MONCONE ANGOLATO (Classe IIb – realizzato in Titanio gr.5)

E' dotato di vite di fissaggio con la quale si connette all'impianto. E' utilizzato quando gli impianti inseriti presentano disparallelismi notevoli e difficilmente correggibili con i monconi dritti. Torque di serraggio della vite di bloccaggio: 30 Ncm

② ATTACCO A SFERA (Classe IIb – realizzato in Titanio gr.5)

Indicato per l'ancoraggio di protesi Overdenture nel caso in cui il disparallelismo degli impianti non superi i 10°. Si utilizza con la cappetta ritentiva di nylon posta nei relativi contenitori di acciaio che si trovano normalmente in commercio. Torque di serraggio: 35 Ncm

② MONCONE UCLA CON BASE ORO (tipo GOLD) o Cromocobalto (Classe IIb – porzione calcinabile realizzata in POM, vite di fissaggio in titanio gr.5, base in lega d'oro PLATINOR N o in CrCo).

Il concetto di questo moncone è quello del calcinabile. Il vantaggio è che la connessione con l'impianto è già preformata e non si deve creare da fusione. La base è disponibile con due versioni di connessione all'impianto: con esagono (antirotante) e senza esagono (rotante). Si connette alla porzione calcinabile mediante connessione cilindrica. La porzione calcinabile è interamente modificabile dal tecnico. La versione con esagono è ideale per denti singoli avvitati o per la costruzione di monconi. La versione senza esagono è ideale per ponti avvitati, per sottostrutture connesse direttamente agli impianti o per barre di overdentures. Torque di serraggio della vite di bloccaggio: 30 Ncm

② MONCONE Multi Unit Abutment (MUA) Diritti ed angolati (Classe IIb – Realizzati in lega di titanio – TI-6AL-4V)

I monconi angolati sono dotati di vite di fissaggio. Il sistema Multi-unit Abutment è progettato per fornire la massima versatilità e per ottimizzare i risultati estetici delle protesi multiple avvitate. La bassa altezza verticale dei diritti e gli abutment angolati di 17 e 35 gradi, consentono protesi appropriate anche nei casi più impegnativi. Offrono inoltre la possibilità di gestire gli impianti con una massima angolazione di 45°. La soluzione clinica di riferimento (non solo) è quella denominata "All-on-4" è stata sviluppata per sfruttare al massimo la parte di osso disponibile e impiegare la tecnologia del carico immediato. Utilizzando solo quattro impianti nei mascellari completamente edentuli, la soluzione sfrutta i vantaggi dell'inclinazione degli impianti posteriori per fornire un supporto protesico sicuro e ottimale per un ponte, anche con volume d'osso minimo.

Torque di serraggio dei Mua diritti e angolati: === ⚡ 30 Ncm

Torque di serraggio della vite di bloccaggio dei Mua diritti: === ⚡ 15 Ncm

Torque di serraggio della vite di bloccaggio dei Mua angolati 17° e 35°: === ⚡ 15 Ncm

② MONCONE PROVVISORIO IN TITANIO linea TC (Classe IIb – realizzato in Titanio gr.5)

E' composto da un unico pezzo. E' utilizzato principalmente nella protesi totale fissa e viene fornito con la vite di chiusura in titanio gr.5. È disponibile con due versioni di connessione all'impianto: con esagono (antirotante) e senza esagono (rotante). È indicato per protesi avvitata ed ha un sistema esagonale antirotazione ed una connessione conica. Torque di serraggio della vite di bloccaggio: 30Ncm

② MONCONE PROVVISORIO IN TITANIO linea CC (Classe IIb – realizzato in Titanio gr.5)

E' composto da un unico pezzo. E' utilizzato principalmente nella protesi totale fissa e viene fornito con la vite di chiusura in titanio gr. 5. È indicato per protesi avvitata ed ha un sistema esagonale antirotazione. Torque di serraggio della vite di bloccaggio: 30Ncm.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI UTILIZZATI A NORMA 15223-1



Non sterile



Codice lotto



Numero di catalogo



Attenersi alle istruzioni



Fabbricante



SEDE LEGALE
IESS Group S.r.l.
Via Madonna della Salute, 23
33050 Pozzuolo del Friuli UD
Tel: (+39)0432.669191
info@iess.dental
www.iess.dental

SEDE OPERATIVA
Multysystem
Via General Guidoni, 7
20851 Lissone (MB) Italy
Tel: (+39)039.23.02.681
info@multysystem.com