


Organizzatore Bone Profile

31541

PPSU

SI

Consente di ospitare gli strumenti Bone Profiler, oltre alle chiavi e agli inserti necessari per la protesizzazione con monconi Mua, evitando di dover sterilizzare tutto il kit chirurgico.

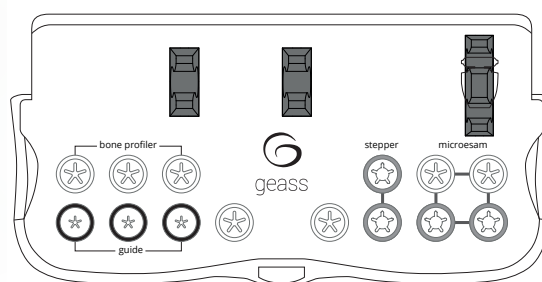


Bone Profiler

H 1 30720

H 3 30722

Inox

Consente di livellare la cresta ossea e creare lo spazio necessario affinché possa essere alloggiato correttamente il moncone Mua. **Va utilizzato in combinazione con la guida**, nella quale deve essere inserito correttamente prima di essere avviato. Velocità massima di utilizzo: 200 rpm. Selezionare lo strumento in funzione dell'altezza del moncone Mua che si intende utilizzare.

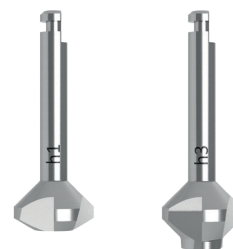

Guida Bone Profiler


30727

Ti


Mantiene il bone profiler nell'asse corretto durante il suo utilizzo, proteggendo la connessione implantare. Prima di utilizzare il bone profiler, avvitare la guida nell'impianto serrandola con gli strumenti Microesam a 15 N•cm.




Protocollo di utilizzo Bone Profile

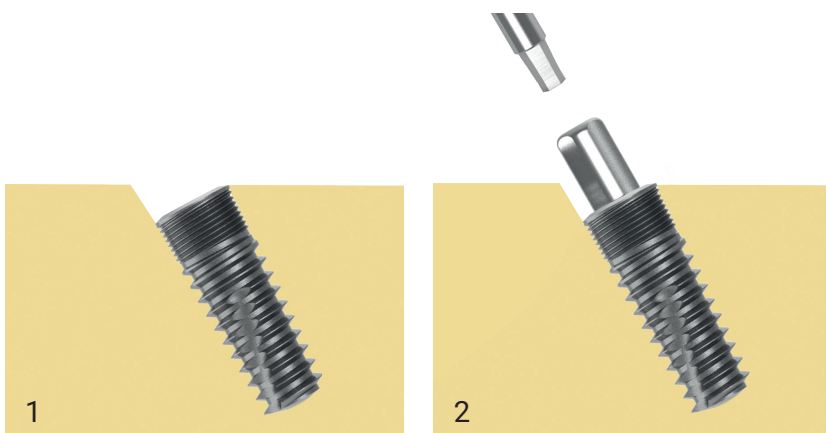

Dopo aver posizionato l'impianto, serrare la **guida bone profiler** nella cava implantare con gli strumenti Microesam a **15 N•cm**.

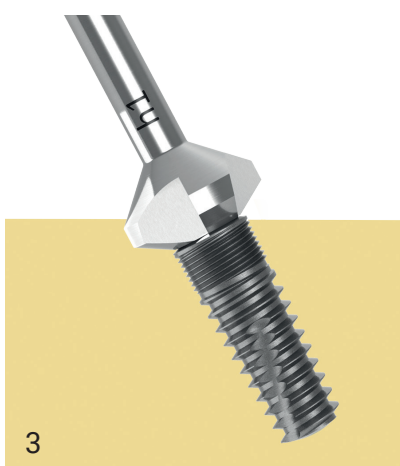

Selezionare il bone profiler corretto in funzione dell'altezza del moncone Mua. Inserire il bone profiler all'interno della guida e, **solo dopo averlo posizionato, avviarlo** ad una velocità massima di **200 rpm**. Nel caso di inserimento implantare particolarmente sottocrestale, fare attenzione ai tessuti molli; se necessario, aprire un lembo per evitare di danneggiarli.

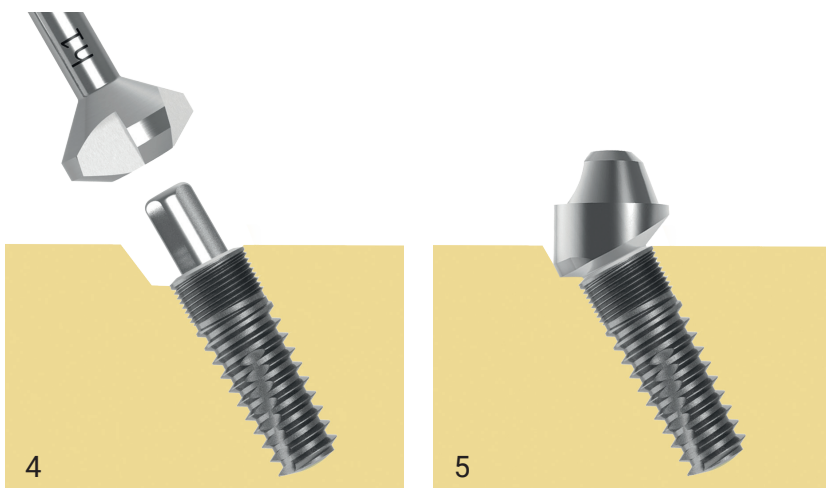

Dopo aver livellato la cresta ossea, rimuovere la guida e posizionare il moncone **Mua**.