

Istruzioni d'uso protesica per impianti Multysystem®

Premessa: Questa linea protesica è progettata per essere utilizzata per la preparazione e protesizzazione di impianti dentali (tipo esagono interno, tipo esagono con cono morse e monofasici) della linea Multysystem

Protesica Classe I:

- ② **MONCONE CALCINABILE (Classe I – realizzato in materiale plastico fondibile POM). La vite di fissaggio è in titanio grado 5.**

Permette la massima personalizzazione del manufatto protesico. Sono disponibili due tipologie: con esagono (antirotante) e senza esagono (rotante). Il tipo con esagono interno è indicato per denti singoli avvitati direttamente sull'impianto o per la costruzione di monconi. Il tipo senza esagono è indicato per ponti avvitati e sotto-strutture connesse direttamente agli impianti. Torque di serraggio della vite di bloccaggio: 30 Ncm

ANALOGO (Classe I – realizzato in Titanio gr.5)

Connettere l'analogo dell'impianto al transfer con la vite di fissaggio. In questa fase è necessario porre notevole attenzione alla manovra di fissaggio, così da garantire il preciso accoppiamento tra l'analogo dell'impianto ed il transfer. Per non indurre torsioni al transfer inglobato nell'impronta, si consiglia di tenere ben saldo l'analogo durante questa fase e di non serrare eccessivamente la vite di fissaggio.

TRANSFERT (Classe I – realizzato in Titanio gr.5)

Posizionare il transfert sull'impianto bloccandolo con la sua vite di fissaggio. Questo consentirà alla vite di fuoriuscire dal portaimpronta e di essere svitata con facilità. Rilevare quindi l'impronta esclusivamente con un portaimpronta individuale forato in corrispondenza dell'impianto così da permettere l'individuazione della vite di fissaggio. Attendere il perfetto indurimento del materiale da impronta, svitare la vite di fissaggio con un apposito avvitatore e rimuovere l'impronta. In questo caso il transfer rimarrà inglobato nel materiale da impronta senza perdere la sua posizione.

AVVERTENZE:

- I dispositivi medici sono forniti NON STERILI. Se previsto, prima del loro utilizzo sterilizzare per 20 minuti a 134°C;
- Materiale per esclusivo uso dentale;
- Verificare sempre l'integrità del confezionamento

ATTENZIONE:

- **NON RIUTILIZZARE** un dispositivo classificato MONOUSO. Anche se non evidente, potrebbe essersi deformato meccanicamente (filetto, esagono) o potrebbe essere contaminato.
- Informazioni più dettagliate sull'utilizzo

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI UTILIZZATI A NORMA 15223-1



Non sterile

LOT

Codice lotto

REF

Numero di catalogo



Attenersi alle istruzioni



Fabbricante



SEDE LEGALE
IESS Group S.r.l.
Via Madonna della Salute, 23
33050 Pozzuolo del Friuli UD
Tel: (+39)0432.669191
info@iess.dental
www.iess.dental

SEDE OPERATIVA
Multysystem
Via General Guidoni, 7
20851 Lissone (MB) Italy
Tel: (+39)039.23.02.681
info@multysystem.com

