

KIT PROTESICO

KIT PROTESICO PSK

cod

PSK

<i>cod</i>	<i>descrizione</i>
MDXS	cacciavite manuale extracorto per esagono 1,25 mm
MDS	cacciavite manuale corto per esagono 1,25 mm
MDL	cacciavite manuale lungo per esagono 1,25 mm
MDLAA	cacciavite manuale per torx angolato
TRT	estrattore per monconi
MTRT	estrattore manuale per monconi
HDH20	connettore per MUA dritti
HDH25M	connettore per Shape Mini
THDDS	cacciavite da contrangolo corto per esagono 1,25 mm
THDDL	cacciavite da contrangolo lungo per esagono 1,25 mm
THDDAL	cacciavite da contrangolo per torx angolato
TWA4	cricchetto dinamometrico



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI KIT

PULIZIA

1. **Smontare** tutti i pezzi composti.
2. **Sciacquare** abbondantemente con acqua fredda o tiepida per **2,5 minuti**.
3. Lasciare gli strumenti per **10 minuti** in un pulitore ad **ultrasuoni** con un detergente enzimatico a pH neutro diluito in acqua secondo le istruzioni del prodotto.
4. **Lavare** con acqua per **3 minuti**.

STERILIZZAZIONE

Di seguito sono riportate le linee guida per il processo di sterilizzazione.


Il superamento di questi parametri di sterilizzazione può deteriorare i componenti in plastica.

Tipo di ciclo (valore)	Temperatura (°C - F)	Esposizione	Asciugatura
Pre-vuoto	132 / 270	3 minuti	30 minuti
Pre-vuoto	134 / 273	18 minuti	30 minuti
Gravità	121 / 250	80 minuti	30 minuti



CONNETTORI

Nel kit i connettori hanno tutti un attacco da manipolo che grazie alla speciale rondella (WH2) potranno essere utilizzati sia in modalità manuale che con il cricchetto. I torque di inserimento per il **carico immediato** dovranno essere compresi nel range **da 35 a 50Ncm**. Per il **carico convenzionale** il torque di inserimento non dovrà mai essere superiore a 50Ncm.

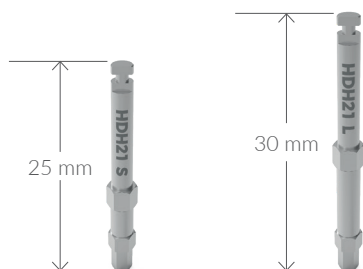

Materiale: Acciaio chirurgico

cod

HDH25M

Connettori per Shape Mini

cod

HDH20

Connettori per MUA dritti



CHIAVI E CACCIAVITI

CACCIAVITI PROTESICI

Materiale: Acciaio chirurgico

cod

corto	THDDS
lungo	THDDL

Cacciavite da contrangolo per esagono 1,25 mm



code

extra corto	MDXS
corto	MDS
lungo	MDL
extra lungo	MDXL

Cacciavite manuale per esagono 1,25 mm



cod

MDLAA

Cacciavite manuale per torx angolato



cod

THDDAL

Cacciavite da contrangolo per torx angolato



ESTRATTORI

Materiale: Acciaio chirurgico

cod

MTRT

Per monconi, avvitatore manuale



cod

TRT

Per monconi



CRICCHETTO

Materiale: Acciaio chirurgico

Cricchetto fisso reverse: consente di avvitare e svitare senza dover estrarre e girare l'adattatore

Braccio dinamometrico: montato sul cricchetto reverse consente di misurare fino a 70Ncm senza rompere l'asta grazie al fermo corsa finale



Alloggiamento per rondella da 8mm per conferire maggior resistenza ai torque più elevati.



Sopra i 70Ncm è presente un fermo di sicurezza per evitare la fuoriuscita del braccio di trascinamento, evitandone la rottura.



Reverse per cambiare verso di svitamento e avvitamento senza dover togliere e riposizionare il cricchetto.



Adattatore da cricchetto

Ø 8 mm rinforzata che conferisce robustezza

cod

WH2

Materiale: Acciaio chirurgico

cod

TW4

Senza adattatore



cod

TWA4

Completo

