


Drill controller

Contiene gli stop per fresa elicoidale, dei quali ne agevola l'inserimento, e gli stop per fresa finale, per i quali ne consente la rimozione.

Il coperchio è provvisto di una scala graduata millimetrica, da utilizzare sempre per verificare che la parte lavorante della fresa sia della lunghezza corretta.

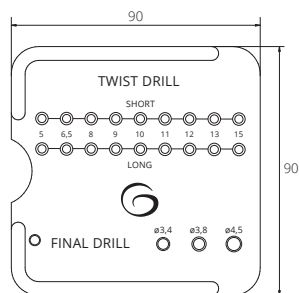

stop non inclusi	31549
PPSU	PP



scala graduata


Stop per fresa elicoidale



Consentono di raggiungere con le frese elicoidali la **profondità programmata** in modo preciso, sicuro e controllato, salvaguardando le zone di rispetto anatomico. Gli stop dedicati alle frese lunghe sono contraddistinti dalla lettera "L".

	lunghezza impianto								
	5	6,5	8	9	10	11	12	13	15
fresa corta	31259	31262	31265	31268	31271	31274	31277	31280	31283

TI

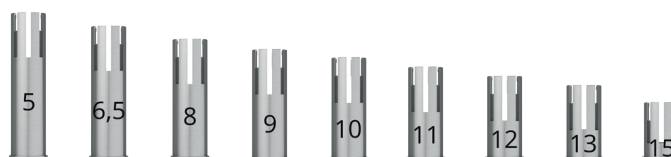

	lunghezza impianto								
	5	6,5	8	9	10	11	12	13	15
fresa lunga	31286	31289	31292	31295	31298	31301	31304	31307	31310

TI



! Vanno utilizzati esclusivamente con le frese elicoidali del presente catalogo, pena gravi rischi per il paziente.

Stop per fresa finale

	16549
	10953
	10954
Inox	



Permettono di controllare la profondità di perforazione durante l'**ultima fase di fresatura**, riducendo i rischi di lesioni nelle zone di rispetto anatomico.

Non vanno utilizzati nelle frese lunghezza 5 e 6,5 mm, in quanto lo stop è già integrato nelle frese stesse.


► Protocollo di utilizzo

Stop per fresa elicoidale



Fissata la fresa al manipolo, inserirla nel drill controller selezionando lo stop in base alla lunghezza dell'impianto da inserire.

Affondare la fresa fino a portarla in battuta con lo stop; una volta agganciato, estrarre la fresa. Verificare la correttezza dello stop inserito utilizzando i riferimenti presenti sul coperchio del drill controller; la parte lavorante della fresa deve corrispondere alla lunghezza dell'impianto prescelto.

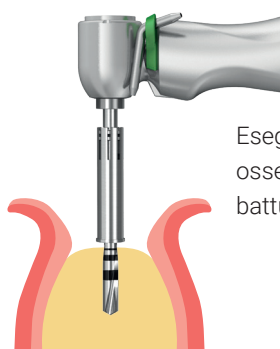


Eseguire la perforazione nel tessuto osseo fino a quando lo stop va in battuta con la corticale.



Terminata la perforazione, estrarre lo stop facendo attenzione al tagliente della fresa.

◆ Protocollo di utilizzo


Stop per fresa finale

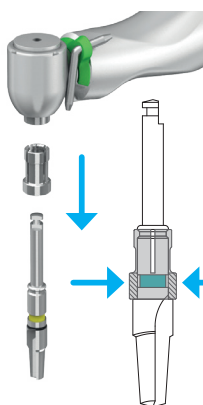

Inserire lo stop sulla fresa dall'alto, secondo il verso indicato. Fissare la fresa al manipolo. Premere il dispositivo nella parte contrassegnata dalle frecce e spingere fino ad avvertire un click.



Eseguire la perforazione nel tessuto osseo fino a quando lo stop va in battuta con la corticale.

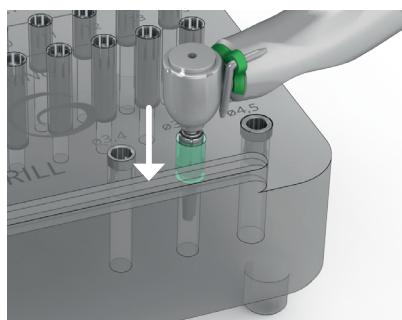

Terminato l'utilizzo inserire nuovamente la fresa (ancora fissata al manipolo) nel drill controller, nel foro corrispondente al diametro dello stop. Premere verso il basso; la scanalatura presente all'interno del foro consente di sganciare lo stop. Rimuovere dal manipolo la fresa e, di conseguenza, lo stop.