



IESS Group è la nuova realtà internazionale nata nel 2021 dalla fusione di **Geass** e **iRES Group**, ulteriormente cresciuta nel 2022 con l'ingresso di **Multysystem**.

A un **portafoglio prodotti tra i più ampi del settore**, IESS Group affianca un'**ampia gamma di servizi**, pensati per sostenere l'odontoiatra in tutti gli aspetti della sua professione.



IESS Group Srl

Via Madonna della Salute 23
33050 Pozzuolo del Friuli (UD) Italy
T +39 0432669191 · info@iess.dental
www.iess.dental

PRENDITI
CURA DEL
TUO **SORRISO**



Grazie agli impianti, hai riscoperto il **piacere di sorridere** e la serenità di mostrarti in pubblico. Per poter mantenere questa **qualità della vita**, è importante prendersi cura del proprio impianto a lungo termine.

Esattamente come per un dente naturale, l'impianto infatti necessita di **regolari controlli** e un'**accurata igiene orale**.

Vediamo assieme quali sono gli aspetti principali da ricordare nella cura post impianto.

COSA FARE SUBITO DOPO L'INTERVENTO

CONFIORE

In seguito all'intervento, usa del ghiaccio esternamente la zona trattata, al fine di evitare dolore e gonfiore.

DOLORE

Assumi i medicinali secondo le prescrizioni del tuo dentista.

IGIENE ORALE

Per evitare sanguinamenti del cavo orale, è sconsigliato effettuare risciacqui con collutori nelle prime ore dopo l'intervento.

CIBO

Durante l'intera fase di guarigione, l'impianto può essere coperto da una "vite di guarigione" o da una protesi provvisoria. Per far sì che la guarigione avvenga in modo sicuro, evita di masticare cibi duri dal lato di posizionamento dell'impianto.

COSA EVITARE

SDRAIARSI

Per i primi giorni, è preferibile **stare seduti** per mantenere la **testa sollevata** rispetto al corpo, sia di giorno sia di notte. Inoltre è sconsigliabile coricarsi sul lato in cui è stato inserito l'impianto.

GUIDARE SUBITO DOPO L'INTERVENTO

Gli **anestetici** potrebbero **alterare** la **capacità di guidare**: chiedi indicazioni al tuo dentista.

UTILIZZARE LO SPAZZOLINO NELL'AREA TRATTATA

Il dentista ti consiglierà il modo migliore di **pulire la zona trattata senza** l'aiuto dello **spazzolino**, fino alla **rimozione** dei **punti**.

MANGIARE DOPO L'INTERVENTO

Attendere il termine dell'effetto anestetico prima di mangiare.

VIZI E SPORT

Evitare alcolici, nicotina, caffè, tè, sport e sforzi fisici per i primi giorni dopo l'intervento.

QUANDO CONSULTARE IL DENTISTA

L'inserimento di impianti dentali è diventata una pratica di routine; tuttavia gli effetti collaterali, anche se molto rari, possono manifestarsi. Se avverti uno dei seguenti sintomi o in caso di dubbi, contatta immediatamente il dentista.

GIORNO DELL'INTERVENTO

Dolore pulsante

Sanguinamento persistente

Dente provvisorio **allentato**

A DISTANZA DI 12 ORE

Sensazione di **torpore** nella zona trattata

GIORNI SUCCESSIVI

Dolore o **gonfiore** sul sito trattato

UN IMPIANTO È COME UN DENTE NATURALE: PRENDITENE CURA!

Visite di controllo **regolari** garantiscono il **mantenimento** della funzionalità e del risultato estetico dell'impianto, per la totale **sicurezza** del paziente.

Il dentista ti illustrerà il modo migliore per **prenderti cura dell'impianto**: spazzolino tradizionale o elettrico e filo interdentale saranno gli alleati del tuo sorriso!

